



БИОМЕРА
ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ



ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ STPL

ООО «Биомера»
115419, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Донской, проезд 2-й Рощинский, д. 8, стр. 3.
info@biomera.ru
www.biomera.ru

Отдел продаж
Сервисный центр
Тел./факс: +7 495 411 99 28
8 800 333 77 14 (бесплатно по России)

- 1) Скопируйте папку, C:\Program Files (x86)\Mera (или папку в которую была установлена программа) и сохраните на рабочем столе – это будет резерв, чтобы не потерять базу данных.
 - 2) Удалите программу обычным способом через «Установка и удаление программ».
 - 3) Скачайте новую версию программы по ссылке <https://nextcloud.mera-device.com/index.php/s/Yf9NwQ4LJiT6xnQ>
 - 4) Разархивируйте скаченный файл. Архив сохраните на любом носителе – это будет резерв программы, если понадобится переустановка.
 - 5) Установите программу обычным способом из разархивированного файла.
 - 6) Если есть база данных от предыдущей программы, то во время первого запуска программа предложит загрузить базу данных, нажмите «Ок».
 - 7) Программа должна полностью загрузиться с существующей базой данных.
-